

# 酸素濃度計 取扱説明書

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

## 測定前の確認


- ① 電源スイッチを ON にして、表示部の数字を確認してください。  
(20.5~21.5 の範囲を表示します)
- ② 表示された数字が 20.5~21.5 の範囲外だった場合は、そのまま 10~15 分お待ちください。  
(酸素濃度計の環境を変えないよう、その場に置いてお待ちください。)
- ③ 15 分以上経過しても 20.5~21.5 の範囲にならない場合はご連絡ください。

## ケージ内の酸素濃度を測定する場合

- ① ケージ内に酸素濃度計を入れてください。
- ② 測定終了まで 10~20 分入れたままお待ちください。
- ③ 表示部の数字がケージ内の酸素濃度です。

## マスク・ホースの先から出ている酸素の濃度を測定する場合

- ① 酸素濃度計の酸素取り入れ口を測定したい場所へ近づけてください。

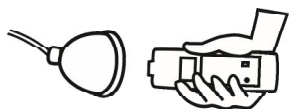


- 注意** ※ご使用後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。
- !** ※本器は精密機器です。水濡れや衝撃が加わると故障の原因となります。

## 電池寿命

電池残量は確認の上お渡ししておりますが、ご使用条件により消耗が早まる場合があります。表示部の数字と電池残量警告ランプが点滅する、または表示部に **bA** と表示される、もしくはブザーが鳴っている場合は電池残量がないことを示しています。ご使用の途中で電池切れになった場合は、本体裏側下部のネジ (1 カ所) を外しカバーを開け、電池交換をお願いいたします。(単 3 電池 2 本 使用)

※電池残量ゼロになると表示が消え、ブザーが鳴らない場合があります。

電池交換後はご使用前に必ず表示部の数字を確認してください。※表面の **測定前の確認** へ

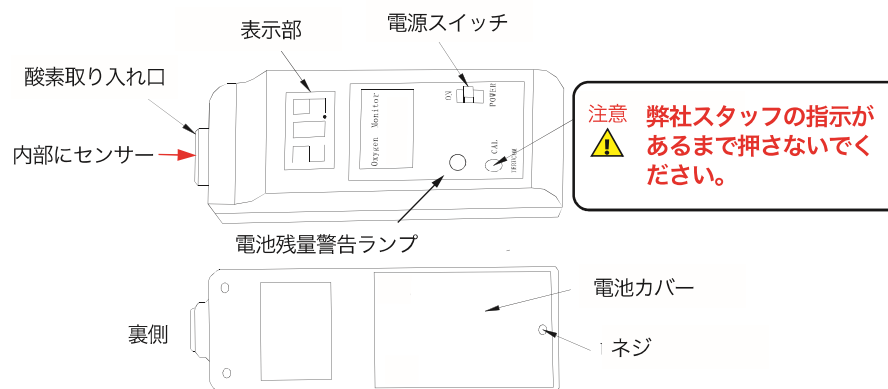

ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。